

## Finish Kit

### COMPONENTES DEL FINISH KIT

- 1 Estación de lavado** Contiene las dos cubetas de lavado. La estación de lavado tiene tapas abatibles para que sea más fácil manejarlas con una sola mano.
- 2 Cubetas de lavado** Consisten en dos cubetas de plástico que se pueden rellenar parcialmente con alcohol isopropílico.
- 3 Cesta de lavado** Utilízala para pasar las piezas de una cubeta a otra. La cesta puede permanecer en el borde de la cubeta de lavado para permitir que las piezas goteen.
- 4 Botella de lavado** Mantenla llena de alcohol isopropílico nuevo para lavar las piezas impresas y limpiar los canales internos.

El acabado de piezas incluye todos los pasos después de la impresión. El kit de acabado (que se incluye con todas las compras de impresoras Form 2) está diseñado para ayudar en el procesamiento posterior y el acabado de sus impresiones de Formulario 2, manteniendo su estación de trabajo limpia y ordenada.

El kit de acabado incluye dos cubos de elevación para eliminar la resina no curada restante de la superficie de las piezas impresas en 3D. Recomendamos el uso de un balde para limpiar y uno para el alcohol isopropílico usado (IPA).

Una vez que el cucharón usado necesita cambiarse (las piezas pueden comenzar a salir pegajosas), puede reemplazarse con un IPA nuevo y el cucharón limpio se puede mezclar en la ranura usada. Después de imprimir, utiliza las herramientas incluidas en el Finish Kit para extraer la pieza impresa de la base de impresión, lavarla y quitar los soportes.

